

КЛАМПЫ

Клампы (кламмера, фиксирующие зажимы) предназначены для фиксации коффердама, обеспечения надежной изоляции рабочего поля и создания условий для комфортного и безопасного стоматологического лечения. Клампы компании «TOP VM» изготовлены из высококачественной упругой нержавеющей стали, обеспечивающей отличную память формы.

Различают бескрылые клампы и клампы с крыльями. Наличие крыльев у клампа позволяет применять «крыльчатую» методику наложения коффердама, которая считается наиболее простой и эффективной. Бескрылые клампы маркируются буквой W (wingless). Они имеют короткие и закругленные боковые поверхности челюстей и предназначены для работы по методике «сначала - кламп, затем - платок». Выпускаются клампы для моляров и премоляров различного размера и для передних зубов - клампы с двумя дугами (кламп-«бабочка»).

При выборе и припасовке клампа необходимо учитывать, что «челюсти» клампа должны плотно охватывать шейку зуба, фиксироваться на ней всеми четырьмя контактными точками. Кламп не должен балансировать на зубе. При одновременном наложении завесы и клампа следует использовать клампы с крыльями (без буквенных обозначений в номере). В случае установки клампа перед введением завесы в полость рта рекомендуется использовать бескрылые клампы (с буквой W в маркировке). Клампы «бабочки» используют при работе по методике «сначала - платок, затем - кламп» или - при наложении клампа с крыльями - по «крыльчатой методике».

Клампы для фронтальных зубов



Клампы-«бабочка» с крыльями (№ 9) и без крыльев (№ W9)



Кламп-«бабочка» по Ferrier (№ 212) с эффектом механической ретракции десны, для пломбирования пришеечных полостей на вестибулярных поверхностях зубов

Клампы для премоляров



Клампы с плоскими горизонтальными «челюстями», с крыльями (№ 2) и без крыльев (№ W2), для премоляров с небольшим размером коронки



Клампы с плоскими горизонтальными «челюстями», с крыльями (№ 2A) и без крыльев (№ W2A), аналоги клампа № 2, но с большими «челюстями», для премоляров с большим размером коронки

Клампы для моляров



Кламп № W3 с плоскими горизонтальными «челюстями», без крыльев, для нижних и верхних моляров с небольшим размером коронки и выраженным экватором



Клампы с плоскими горизонтальными «челюстями», с крыльями (№ 7) и без крыльев (№ W7), для нижних и верхних моляров с большим размером коронки и выраженным экватором



Клампы с жесткими изогнутыми «челюстями» (с глубоким захватом), с крыльями (№ 8) и без крыльев (№ W8A), для верхних и нижних моляров с большим размером коронки, могут быть использованы при сильном разрушении коронки зуба



Асимметричные клампы с горизонтальными зазубренными «челюстями» (tiger-тип), для верхних моляров с треугольной формой коронки - левосторонний - № 12A и правосторонний - № 13A, наиболее часто применяются для наложения на вторые верхние моляры, возможно наложение на третьи верхние моляры



Кламп № W56 с жесткими изогнутыми «челюстями» (с глубоким захватом), без крыльев, для нижних моляров с большим размером коронки, используется в том числе при сильном разрушении коронки зуба

Клампы (ретракторы десневого края) Бринкер

Клампы Бринкер обеспечивают эффективную ретракцию без повреждения десневого края. Клампы выпускаются без крыльев. В отличие от «традиционных» клампов, конфигурация «челюстей» которых соответствует форме шеек зубов, конфигурация «челюстей» клампов Бринкер соответствует форме корней зубов



Кламп № B1, для моляров нижней челюсти



Кламп № B2, для моляров верхней челюсти с левой стороны



Кламп № B3, для моляров верхней челюсти с правой стороны



Кламп № B4, для резцов и клыков



Кламп-«бабочка» № B5 с узкими «челюстями», для реставрации зубов при дефектах V класса по Блеку